



# Juego de adaptador del dispositivo de limpieza de W&H

Puntas para la preparación en los aparatos de limpieza y desinfección

## Adaptador de limpieza para las puntas del eliminador de sarro ultrasónico (profilaxis, periodontología, endodoncia, restauración y prótesis)

- > Todas las puntas del eliminador de sarro con una dimensión de rosca M3 x 0,5 mm [rosca interior – visto desde la punta] se ajustan al adaptador de limpieza con la REF 06895000
- > Puntas EMS con una dimensión de rosca M3 x 0,5 mm [rosca interior], p. ej., EMS C [las puntas EMS con sistema de sujeción rápida no son compatibles].
- > Puntas NSK con una dimensión de rosca de M3 x 0,5 mm [rosca interior], compatible con la pieza de mano EMS Todas las demás puntas NSK no son compatibles
- > Puntas Mectron con una dimensión de rosca M3 x 0,5 mm [rosca interior], p. ej., Mectron S7
- > Las puntas Satelec no son compatibles [dimensión de rosca de M3 x 0,6 mm]

## Adaptador de limpieza para las puntas del eliminador de sarro ultrasónico (cirugía)

- > Solo los instrumentos Piezomed de W&H se ajustan al juego de adaptador del dispositivo de limpieza
- > Las puntas de, p. ej., Sirona SIROSON, NSK SG3, Satelec CS3, Mectron OT 7 no son compatibles debido a que las dimensiones de rosca son diferentes

## Adaptador de limpieza para las puntas del eliminador de sarro ultrasónico (profilaxis, periodontología, endodoncia, restauración y prótesis, cirugía)

- > Todas las puntas del eliminador de sarro con una dimensión de rosca M3 x 0,5 mm [rosca exterior – visto desde la punta] se ajustan al adaptador de limpieza con la REF 06894700
- > Puntas Sirona con una dimensión de rosca de M3 x 0,5 mm [rosca exterior], p. ej., SIROAIR
- > Puntas KaVo con una dimensión de rosca de M3 x 0,5 mm [rosca exterior], p. ej., la punta KaVo 36/10 [las puntas KaVo no se ajustan con el sistema de sujeción rápida].
- > Las puntas NSK con una dimensión de rosca de M3 x 0,5 mm [rosca exterior], p. ej., NSK S1
- > Las puntas Brasseler/Komet con una dimensión de rosca de M3 x 0,5 mm [rosca exterior], p. ej., SF8878KD

Los tubos de irrigación, los clips del tubo de spray y las bifurcaciones Y también podrán limpiarse.

Datos sin garantía