

# La lubrification sans perte de temps

Cet appareil permet d'entretenir les instruments dans un temps particulièrement court.

L'appareil de nettoyage et de lubrification *Assistina Twin* est équipé de deux cuves, de sorte que le processus d'entretien peut être réalisé sans aucune interruption. L'appareil raccourcit la durée d'entretien à 10 secondes seulement pour le nettoyage des canaux de spray et la lubrification de tous les éléments rotatifs. Les instruments peuvent être préparés entre deux traitements sans attente, ni pour les patients, ni pour les praticiens.

L'appareil, au design ergonomique, convient à tous les cabinets dentaires. Il est capable de traiter jusqu'à 360 instruments par heure. Les deux cuves peuvent être équipées d'adaptateurs selon les besoins. Le *Twin Care Set* comprend une cartouche de solution de nettoyage, une cartouche de lubrifiant *Service Oil F1* et un filtre HEPA. Il ne se change qu'après le traitement de 2 800 instruments. Tous les consommables se remplacent facilement et sans outil.

*Assistina Twin* permet la lubrification minutieuse et complète des éléments de transmission et le nettoyage des canaux de spray grâce à la technologie innovante de la nébulisation. L'huile est nébulisée avant d'être soufflée à haute pression dans l'instrument. Cette opération élimine encore mieux les salissures présentes à l'intérieur de l'instrument. La fine nébulisation atteint les angles les plus inaccessibles des éléments de transmission. Tous les aérosols sont éliminés des cuves par une aspiration active et le filtre HEPA intégré.

Grâce à la surveillance intelligente du processus, l'appareil effectue un entretien minutieux avec une consommation réduite et donne une information sur l'utilisation des consommables. ↻



## Le témoignage du docteur Yves WAHBA (25)



### SON NETTOYAGE EST FACILE

*J'utilise cet appareil depuis deux mois à la suite d'un changement de local avec un nombre de fauteuils dentaires doublé. J'étais très satisfait de l'Assistina 301, de par sa fiabilité et la durée du cycle. J'ai voulu récidiver avec un produit capable de traiter plusieurs instruments sans sophistication excessive pour faire face à l'accroissement de mon activité et à la rotation des divers instruments entre les patients. Je l'utilise pour le nettoyage et la lubrification interne après une décontamination externe et avant un cycle Prion par l'autoclave. Il est rapide, simple et son nettoyage est facile, tant au niveau du panneau de commande que des cuves. J'intégrerais, si cela était possible, la possibilité d'un troisième instrument. Un changement simplifié des adaptateurs turbines pour les différentes marques serait aussi intéressant.*

## Le témoignage du docteur Ajmal PANCHOO (62)



### UN GAIN DE TEMPS POUR LES ASSISTANTES ET PRATICIENS

*J'utilise ce matériel depuis le mois de décembre. Je l'ai choisi pour la rapidité de la lubrification des turbines et contre-angles (mes instruments sont prêts très vite), et aussi pour permettre aux assistantes de gagner du temps car le nettoyage des instruments se fait très facilement. On l'utilise entre chaque patient, cela permet un entretien rapide et efficace des instruments. J'utilise les turbines Synea à LED+ au cabinet et je trouve que depuis l'utilisation de l'équipement je n'ai pas de souci avec mes turbines, elles sont toujours en parfait état.*

*Son avantage principal est le graissage ultrarapide des turbines et contre-angles, en dix secondes c'est fait ! L'autre avantage est le fait qu'il comporte deux chambres. L'appareil est silencieux, je l'ai même installé dans la salle de soins. Il ne prend pas beaucoup de place, le design est beau et je peux moi-même l'utiliser lorsque les assistantes sont occupées. C'est un produit que je conseille à mes confrères. Il est efficace avec une consommation minimale de produit d'entretien et un gain de temps pour les assistantes et praticiens.*



## Le témoignage du docteur Luc FLECHAIRE (41)



### SON EMPLOI EST FACILE ET RAPIDE

*J'emploie cet appareil depuis octobre 2017. J'ai utilisé l'ancien Assistina pendant de nombreuses années (deux appareils successifs) avec satisfaction. Pour moi cet appareil représente une suite évolutive cohérente. Je l'utilise entre chaque rendez-vous. Il permet de traiter rapidement deux instruments : un contre-angle et une turbine, à proximité du fauteuil de soins. Son emploi facile et rapide permet d'utiliser pleinement cet appareil. Si je pouvais changer quelque chose, j'intégrerais peut-être une indication du niveau de remplissage des cartouches.*



**La  
lubrification  
complète des  
éléments de  
transmission et  
le nettoyage des  
canaux de  
spray.**



**W&H**

Tél. : 03 88 77 36 00

@ : commercial.fr@wh.com

3w : wh.com